



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materac przeciwodleżynowy

AT03101, AT03101D, AT03102, AT03102D, AT03103, AT03103D



Materace piankowe przeciwdrożynowe na łózka szpitalne. Materace umożliwiają optymalne rozłożenie nacisku wywieranego przez ciało na tkanki przylegające do podłoża. Dzięki temu spowalniają proces zatykania naczyń krwionośnych, prowadzący do powstawania odleżyn. Zalecane są dla osób o znacznie ograniczonej ruchowości, spędzających większość czasu w pozycji leżącej.

Odpowiednia sprężystość pianki, z której wykonany jest materac zapewnia równomierne rozkładanie ciężaru ciała podczas leżenia lub zmiany pozycji, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen, profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych.

Wymiary:

AT03101, AT03101D Materac przeciwdrożynowy piankowy (w pokrowcu do dezynfekcji): 200x90x10 cm

AT03102, AT03102D Materac przeciwdrożynowy gofrowany (w pokrowcu do dezynfekcji): 200x90x15 cm

AT03103, AT03103D Materac piankowy 7-STREFOWY (w pokrowcu do dezynfekcji): 200x90x15 cm

Maksymalna waga użytkownika wynosi 130 kg.

Instrukcja prania pokrowca nieprzemakalnego:

1. Nie prać pianki!
2. Prać ręcznie wyłącznie pokrowiec.
3. Czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki z dodatkiem środka piorącego.
4. Maksymalna temperatura prania 40°C.
5. Nie chlorować! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).
6. Nie czyścić chemicznie!
7. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej (suszenie w normalnej temperaturze).
8. Nie prasować! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer).
9. Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych).

Instrukcja prania pokrowca do dezynfekcji:

1. Nie prać pianki!
2. Czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki z dodatkiem środka piorącego.
3. Maksymalna temperatura prania 90°C.
4. Nie chlorować! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).
5. Nie czyścić chemicznie!
6. Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej (suszenie w normalnej temperaturze).
7. Nie prasować! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer).
8. Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych).

UWAGI I OSTRZEŻENIA:

1. Zabronione jest stosowanie wyrobu u dzieci poniżej 3 roku życia. Miękką strukturą gąbki może poważnie zakłócić proces oddychania w przypadku, gdy dziecko leży w pozycji na brzuchu.
2. Nie należy leżeć na materacu w pozycji na brzuchu.
3. Należy unikać kontaktu produktu z ogniem. Produkt może się zapalić.

UWAGA: Materac nie chroni w pełni przed powstawaniem odleżyn u osób pozostających przez długi czas w pozycji leżącej bez ruchu (np. osób sparaliżowanych, po wylewie krwi do mózgu, nieprzytomnych, itp.).

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregośkolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA:

Rozłożony materac potrzebuje około 72 h do pełnego osiągnięcia swoich właściwości, kształtu i pełnej objętości.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny z wyjątkiem wyrobów elektrycznych – należy postępować w sposób właściwy dla utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA.

KARTA GWARANCYJNA

Model:

Numer Seryjny:

Pieczęć punktu sprzedaży

i czytelny podpis Sprzedającego:

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA), W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net

