



**Krzesło toaletowe –
instrukcja obsługi.**

Modele: AT01001, AT01002, AT01003



Krześła toaletowe - modele AT01001, AT01002, AT01003 są nowoczesnymi produktami przeznaczonymi dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Pozwalają na załatwianie potrzeb fizjologicznych bez konieczności udawania się do toalety. Mogą być stosowane w bezpośredniej bliskości łóżka lub miejsca, w którym przebywa osoba o ograniczonych możliwościach ruchowych. Dzięki zastosowaniu lekkich materiałów łatwo je przestawić. Model AT01003 ma ponadto koła umożliwiające przejeżdżanie nim pomiędzy poszczególnymi miejscami (jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy na krześle nie siedzi użytkownik). Model AT01002 ma z kolei możliwość regulacji szerokości siedziska oraz rozkładania wyrobu, co ułatwia jego transport.

UWAGI i OSTRZEŻENIA

- Nie stosować, jeżeli waga użytkownika przekracza 150 kg.
- Nie bujać się na krześle - grozi to upadkiem i obrażeniami.
- Przed użyciem upewnić się, że wiaderko jest na miejscu i jest zdjęta pokrywa.
- Po użyciu należy opróżnić wiaderko i umyć je. W przeciwnym razie występuje ryzyko kontaktu z odchodami i zakażenia.
- Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem. Wyrób może się zapalić.



TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWANIE:



Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy wyregulować jego wysokość. W tym celu należy wyjąć klips, wyregulować wysokość - jednakową dla wszystkich czterech nóg, a następnie wsunąć klips w odpowiedni otwór. **NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STALOWY BOLEC PRZECHODZI PRZEZ OTWÓR PO OBU STRONACH ŚCIANKI.** W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec zniekształceniu.




Wiaderko należy wsunąć w prowadnice, zdjawszy przedtem pokrywę. Jeżeli prowadnice byłyby wyjęte należy zamocować je wsuwając końcówki w otwory w górnej części rurek na których spoczywa deska sedesowa. Po wykonaniu czynności fizjologicznych przez użytkownika zaleca się wyjęcie wiaderka, przykrycie go pokrywką, opróżnienie oraz umycie.

KONSERWACJA WYROBU

Wyrób należy okresowo wyczyścić za pomocą wody i środków czyszczących. Wyrób może być poddawany działaniu środków dezynfekujących.

Nie używany wyrób powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu. Unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne.

SKŁADANIE WERSJI Z REGULACJĄ SZEROKOŚCI.

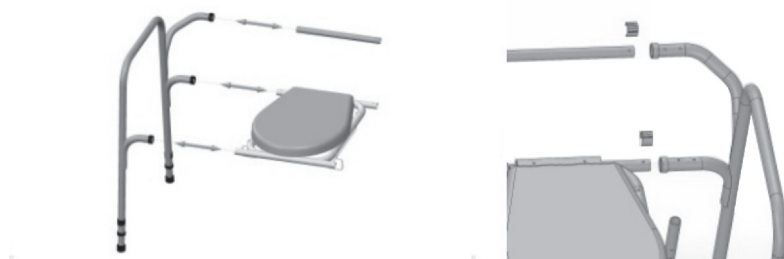

W przypadku modelu AT01002 możliwe jest rozłożenie wyrobu oraz regulacja jego szerokości.

W tym celu należy wyjąć klipsy mocujące, wyregulować szerokość do pożądanej i zamocować klipsy z powrotem (jak pokazano na rysunkach). **NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE STALOWY BOLEC PRZECHODZI PRZEZ OTWÓR PO OBU STRONACH ŚCIANKI.** W przeciwnym wypadku wyrób może nie być stabilny, a otwór może ulec zniekształceniu.

WERSJA Z KOŁAMI

W celu przemieszczenia wersji z kołami należy odblokować hamulce, przemieścić krzesło w punkt docelowy, a następnie zablokować hamulce.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ABY HAMULCE BYŁY ZABLOKOWANE, GDY NA KRZEŚLE SIADA UŻYTKOWNIK.

KRZEŚLO NIE JEST PRZEZNACZONE DO JEŹDŻENIA Z UŻYTKOWNIKIEM SIEDZĄCYM NA NIM.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
 - czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
 - poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
- należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

SPOSÓB UTYLIZACJI WYROBU PO WYCOFANIU Z EKSPLOATACJI

Po wycofaniu wyrobu z eksploatacji wyrób medyczny można zutylizować jak zwykły odpad komunalny



KARTA GWARANCYJNA



Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy:

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.

2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.

4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.

5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.

6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.

7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.

8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.

9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net



Data wydania instrukcji: 20.05.2021
v1-2 20.05.2021

