



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PODUSZKA OBROTOWA



Ważne uwagi i ostrzeżenia

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania produktu oraz cenne porady dotyczące bezpieczeństwa użytkownika. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania porady i pomocy. Produkt należy regularnie sprawdzać pod kątem powstałych uszkodzeń, w wypadku jakichkolwiek usterek natychmiast należy zaprzestać użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIE OGÓLNE

Nie należy użytkować wyrobu przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją i jej zrozumieniem. Jeśli nie rozumiesz ostrzeżeń, ostrzeżeń lub instrukcji, skontaktuj się ze specjalistą w zakresie opieki zdrowotnej bądź sprzedawcą aby uniknąć uszkodzenia produktu.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.

UWAGA: W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:

- a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
- c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego

należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

UWAGA: Nie używaj igieł, narzędzi szweskich ani innych ostrych narzędzi w kontakcie z poduszką.

UWAGA: Zabrania się stosowania poduszki przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej!

UWAGA: Zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGA: Nie należy przesuwac poduszki gdy przebywa na niej pacjent.

UWAGA: Należy sprawdzać poduszkę codziennie pod kątem przetarć/rozwarstwienia/ uszkodzenia materiału.

UWAGA: Produkt łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł ognia.

Przeznaczenie/wskazania:

Produkt doskonale sprawdzi się w zwykłych życiowych sytuacjach. Miękką, elastyczną i wygodną poduszką, idealną do wykorzystania na siedzeniu w samochodzie, krześle czy łóżku przy problemach z obracaniem się. Pozwala idealnie dostosować siedzisko do własnych potrzeb,

ułatwia obracanie się i wstawanie. To idealne rozwiązanie dla osób cierpiących na bóle pleców, kręgosłupa oraz nóg. Jest to doskonała pomoc w transporcie osób chorych i z problemami motorycznymi. Podstawa poduszki obrotowej pokryta jest materiałem antypoślizgowym, zaś siedzenie tapicerowane w celu zwiększenia komfortu.

Cechy produktu:

- pozwala obrócić się w pozycji siedzącej w zakresie 360 stopni bez nadmiernego nadwyrężania mięśni i stawów.
- idealne rozwiązanie dla osób starszych, które mają problemy ze wstawaniem np. od stołu lub wsiadaniem/wysiadaniem z pojazdu- wszędzie tam gdzie należy wykonać obrót przy zmianie pozycji
- wykonana z materiałów o wysokiej jakości, co zapewnia jej wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.

Przeciwwskazania: problemy zdrowotne uniemożliwiające siedzenie na poduszce oraz bezpieczne użytkowanie produktu.

Zasady przygotowania poduszki do użytku: poduszkę należy umieścić w wybranym/ odpowiednim miejscu warstwą antypoślizgową do dołu.

Specyfikacja/zakres dostawy: poduszka, instrukcja użytkowania

Wymiary: 44 cm x 44 cm x 2,5 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg



TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA

Materiał: powłoka: 100% poliester; wewnątrz: bawełna PP + pianka / ABS

Czyszczenie:

Poduszkę należy delikatnie czyścić ciepłą wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia. Czyścić regularnie, przechowywać w suchym miejscu, gdy nie jest używana, trzymać z dala od ostrych przedmiotów.

Uwaga: Nie wolno prać poduszki w pralce, używać wybielacza, suszyć w suszarce bębnowej, wystawiać na słońce, prasować, czyścić chemicznie. Zabronione jest używanie detergentów oraz innych rozpuszczalników. Nie ogrzewać poduszki oraz nie używać autoklawu

Uwaga: Produkt należy konserwować w suchym środowisku.

Utylizacja: Odpad komunalny, należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami utylizacji.

Model:

Numer Serii:

Pieczęć punktu sprzedaży
i czytelny podpis Sprzedawcy:

- 1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji na poduszkę, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.
- 2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
- 3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji.
- 4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesałać na adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.
- 5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.
- 6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, elementy gumowe i inne.
- 7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
- 8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.
- 9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie będą uwzględniane.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail: antar@antar.net

